

要保管

HIGH LINE

THE MFIP BRUSH



※ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

取扱説明書に関するご注意

◆この度は弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、本機器を安全にご使用いただくために大変重要です。本機器を他の方に貸与または贈呈される際は、必ずご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただくようお願いください。

正しく安全にご使用いただくために

ご使用前に必ず本紙をお読みにになり、正しくご使用ください。

お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。

警告サインの表示と意味は次のようになっています。

⚠危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意 「軽傷を負うことや、財産の損害[※]が発生するおそれがある内容」です。
※家屋・家財および家畜・ペットにかかる甚大損害を示します。

■図記号



「危険・警告・注意」を促す内容です。
※表示例は「感電注意」



実行してはいけない「禁止」の内容です。
※表示例は「分解禁止」



行為を指示する「強制」の内容です。
※表示例は「プラグをコンセントから抜く」

⚠危険

次のような医用電子機器を使用している方は、本機器を使用しないでください。
医用電子機器の誤作動は、事故や体調不良の原因となります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器
- ・人工心臓などの生命維持用電子機器
- ・心電計・点滴器などの装着型の医用電子機器

⚠警告

次のような方または部位へのご使用は避けてください。

- 心臓疾患などを発症している方や血圧異常時
- 発熱を伴う疾患や感染症疾患、急性疾患を患っている方
- 悪性腫瘍のある方
- アレルギー体質(アトピー性皮膚炎など)で美容機器の使用が困難な方
- 手術を受けた部位や金属・プラスチック・シリコンを埋め込んでいる部位
- 心臓周辺・眼球及び上まぶた・唇や口の中等の粘膜・陰部等
- 傷口・湿疹・乾癬・ヘルペス・化膿したニキビ・吹き出物のある部位
- 血友病疾患・出血性疾患・糖尿病を伴う病気の方
- 顔面黒皮症の方・病的なシミ・ホクロ・ウイルス性のイボのある部位
- 過度の日焼けで炎症を起こしている部位
- 光過敏症・ケロイド体質・色素異常
- 消化器系疾患、または可能性がある方
- 妊娠中の方・授乳中の方・生理中の方
- ステロイドホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- マヒのある方・意思表示ができない方
- 体調がすぐれない方・疲労が激しい方
- 酒気帯び・二日酔いの方
- ※12歳以下の方のご使用は避けてください。
- ※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
- ※過去に下記トラブルの経験がある方は医師にご相談の上、ご使用ください。
 - ・化学繊維でのトラブル(かぶれ等)
 - ・化粧品によるトラブル(かぶれ等)
 - ・美容機器等を使用したトリートメントによるトラブル

使用前のご注意

⚠ 危険

他の美容機器とは同時に使用しないでください。



⚠ 警告

事故やトラブルの原因となるため、下記の事項を必ずお守りください。

- ①指定されている部位・美容目的以外には絶対に使用しないでください。
- ②水分や湿気の多い場所・ほこりの多い場所では絶対に使用しないでください。
- ③ACアダプターが傷んだら、ご購入店舗または代理店にお問い合わせください。
- ④仕様に記載されている以外の電源・電圧で使用しないでください。
- ⑤ヘッドには使用しないでください。



⚠ 注意

- ①タコ足配線での使用はしないでください。
- ②本機器やACアダプターに水をかけたり、こぼしたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ③ACアダプターを抜き差しするときは、必ず先端のプラグを持って抜き差ししてください。コードを持って抜き差ししないでください。
- ④本機器をご使用の際は、必ず貴金属類(時計・指輪・ピアス・ネックレス等のアクセサリー類)や眼鏡・コンタクトレンズは外してください。
- ⑤他の製品の部品や付属品などを流用しないでください。

使用中のご注意



⚠ 警告

- ①肌や身体に痛みや異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- ②強い刺激を過度に感じた場合は直ちに使用を中止し、ご購入店舗または代理店にお問い合わせください。
- ③地震や雷の時は使用を中止し、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ④LEDの点灯中に光源を覗いたり、直視しないでください。

⚠ 注意

- ①本機器に異常が見られたら直ちに使用を中止し、ご購入店舗または代理店にお問い合わせください。
- ②本機器を直接他の電化製品(テレビ・ラジオ・パソコン・携帯電話・スアレーオ・他の美容機器など)に接触させないでください。
- ③使用中に本機器を移動する際は、落とさないように注意してください。
- ④使用中に本機器が熱を帯びることがありますが、安全性に問題はありません。
- ⑤ヘッドに傷がついたまま使用しないでください。

使用後のご注意

⚠ 注意

- ①ご使用後は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ②本体は、水を含ませ固く絞った柔らかい布で汚れを拭き取り、保護キャップをはめて安全な場所で保管してください。
※硬い布で拭くと本体を傷つけたり、機能が低下する原因となります。
※アルカリ剤・アルコール・シンナー・ベンジン等の溶剤や除光液・磨き粉・熱湯・薬品類は使用しないでください。
※専用美容液が付着した状態で放置しないでください。
※保護キャップは変形しやすい為、無理に曲げたり、過度な力を加えないでください。また、本体が熱を帯びた状態でほめないでください。

保守・点検のご注意



⚠ 警告

- ①分解・修理・改造をしないでください。修理の場合は、ご購入店舗または代理店にお問い合わせください。
- ②本機器を高い場所から落したり、強い衝撃を与えないでください。
誤って落とした場合は、必ず点検してからご使用ください。(LEDの点灯状態・亀裂の有無等)
- ③本機器に防水性は無い為、水洗い・掃除は絶対にしないでください。



⚠ 注意

- ①次のような場所には保管しないでください。
 - ・直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・粉塵の多い場所
 - ・高温または氷点下になる場所・炎天下の自動車内など
 - ・引火の危険がある場所・風雨にさらされる場所
 - ・化学薬品やガスが発生する場所・振動が激しい場所
 - ・暖房器具や熱が発生する器具の近く・磁石の近く
 - ・お客様の手の届く場所
- ②ACアダプターを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりするとコードが破損し、火災・感電・事故の原因となります。

点検をしましょう

- 半年以上使用しなかった本機器を再度、使用する際は、使用する前に異常がないか必ず点検をしてからご使用ください。
(LEDの点灯状態・亀裂の有無等)故障したままでご使用になりますと事故の原因となります。

各部の名称・仕様

【製品構成】



仕 様	製品名	HIGH LINE THE MFIP BRUSH	LED 波長	赤620nm(±10nm)
	電源定格	入力AC 100-240V 50/60kHz 出力DC 12V・1.5A	重量	約168g
	消費電力	最大12W	外形	最大W53.8×L198.4×D83.6
	出力 周波数	80kHz	タイマー	5分

本体操作方法

①ACアダプターを本体・コンセントに差し込みます。

②モードの選択

<MFIP>スイッチを押すことで<MFIP>モードをご使用いただけます。

<SP>スイッチを押すことで<SP>モードをご使用いただけます。

◆いずれかのスイッチを押すとレベル1になり、トリートメントを開始します。

③レベルの選択

◆レベルは4段階あります。

選択したモードのスイッチを押すことによりレベルを選択できます。

※<MFIP>モードの際はレベルランプが赤色に点滅し、<SP>モードの際はレベルランプが赤色に点灯します。

※初めてご使用される際は<MFIP>モード、<SP>モードのいずれもレベル1から開始し、レベルを上げ気持ち良いと感じるレベルでトリートメントを行ってください。

※レベルを下げる際やモードを切り替える際は、使用中のモードのスイッチを押し、電源を切ってください。

その後、レベル調節や各モードの選択を行ってください。

④VR(バイブレーション)の選択

※使用時はバイブレーションをONにしてお使いください。

※2種類のモードがあります。

各部名称




【VRスイッチ】
バイブレーションが作動し、振動が発生します。

【レベルランプ】
MFIPモード・SPモードの現在のレベルが表示されます。

【SPスイッチ】
SPモードが使用できます。

【MFIPスイッチ】
MFIPモードが使用できます。

レベルランプの説明

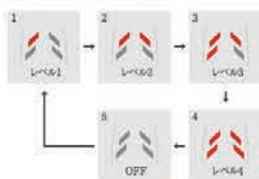

トリートメント方法

トリートメントの手順はP10をご覧ください。

トリートメント前に

- ① 洗髪後にタオルドライを行い、頭皮を清潔な状態にしてください。
- ② 身に着けている貴金属類(時計・指輪・ピアス・ネックレス等のアクセサリ類)や眼鏡・コンタクトレンズを外してください。

トリートメント方法

◆基本トリートメント：＜SPモード5分＞＋＜MFIP モード5分＞＝合計10分

- ①トリートメント部位(あご先～後ろ肩)精製水、(頭皮)専用美容液を塗布し、トリートメントを行ってください。
※使用範囲により、プッシュ回数を増やして塗布量を調節してください。
※トリートメントの途中で乾きを感じたら専用美容液を付け足してください。
※トリートメントを行う部位(頭皮)に本体のヘッドを全て密着させ、ゆっくりと動かしてください。
※1回で10分以上のご使用はお控えください。
※使用中、ヘッドに汚れ等が付着してざらつく場合には、柔らかい布やティッシュ等で拭き取ってください。

トリートメント後に

- ①トリートメント後、頭皮に残った専用美容液は、指の腹で優しくマッサージをするようになじませてください。
- ②本体からACアダプターを外して汚れを拭き取り、保護キャップをはめて安全な場所で保管してください。

トリートメント手順

ヘッドトリートメント

◆トリートメント時間：合計10分

※5分経過すると自動的に電源がOFFになります。



①【あご先～後ろ肩】

- ・SPモードであごの先から耳下までフェイスラインに沿ってスライドさせます。
 - その後、耳後ろから後ろ肩まで直線的にスライドさせます。
 - ・終わりましたら反対側も同じようにご使用ください。
- (合計1分)



②【側頭部～後頭部】

- ・SPモードで左半分の側頭部(こめかみ)から後頭部へ、円を描くようにクルクルとマッサージしながら当てスライドさせていきます。
 - ・終わりましたら反対側も同じようにご使用ください。
- (合計4分)



③【前頭部～頭頂部】

- ・MFIPモードに切り替えて前頭部から頭頂部へスライドさせながらご使用ください。
- (合計5分)

注意事項

- ・ご使用時はLEDの光とヘッド(先端部分)がまんべんなく当たるよう、肌にしっかり密着するように押し当ててください。
- ・本機器はゆっくり動かしてください。
- ・最初はレベル「1」から開始し、慣れてくるにしたがって、気持ちよいと感じるレベルまで上げてください。
- ・10秒に1度「ビッ」という音が鳴りますので、施術時間の目安にして動かしてください。
- ・電源を入れ、5分経過すると自動的に電源がOFFになります。